

ディスポ【スタイレット】使用の留意点

2015/12/3

ディスポ【スタイレット】を安全、適切にご使用いただくため以下の点にご留意ください。

1. 本品は滅菌の単回使用商品のため、再滅菌しないこと。
2. 二次的加工をしないこと。
3. 単回使用気管内チューブスタイレットであるため経鼻挿管には使用しないこと。
4. 耐用期間（3年）を越えて使用しないこと。
5. 気道確保や麻酔手術に用いるものであるため、長時間使用しないこと。
原料PVCの性質上、強度が軽減され使用しにくくなる場合がある。
この場合は速やかに新しいものと取り替えること。
6. 曲げ伸ばしを繰り返すと金属疲労により折損を起こす場合も想定されるので
この場合は速やかに新しいものと取り替えること。
7. 気管挿管とは、正しいサイズの組み合わせで使用すること。（表参照）
不適切なサイズの組み合わせの場合、力の入れ方にムラが生じ安定度に欠ける。

【スタイレットと気管挿管の適応サイズ対応表】			
サイズ	アダプター有り	アダプター無し	気管挿管チューブ ID(mm)
	Fr(mm)×長さ(mm)		
XS	6Fr × 180	6Fr×200	2.5~3.5
S	10Fr × 240	10Fr×280	4.0~6.0
M	12Fr × 280	12Fr×310	6.5~7.0
L	14Fr × 330	14Fr×350	7.5~10.0

第一種医療機器製造販売業者
京中貿易株式会社
604-8371
京都市中京区神泉苑町1番地2
Tel:075-811-0545

製造業者
Hangzhou Jinlin Medical Appliances Co., Ltd.
中華人民共和国 浙江省杭州市