


ディスポで安全・安心

気管挿管の安定性を高めるスタイレットの使い方

※経口挿管用(経鼻挿管には使用しないこと)

【全体の使用方法】


1. 滅菌済みを確認して袋から取り出す
2. 少しカーブをつけておくと挿管しやすい。
3. 先端が気管チューブより先に出ないように長さを調節する。
4. 渦巻きストッパーの位置を固定し、気管チューブに挿入する。
5. 挿管完了後に抜去する。 **※単回使用のこと。**

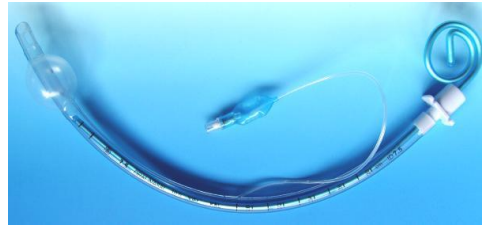

【挿管前の準備】

挿管前にスタイレットを気管内チューブに挿入する。

■スタイレットが短い場合: 上部の渦巻きを伸ばして長くする。

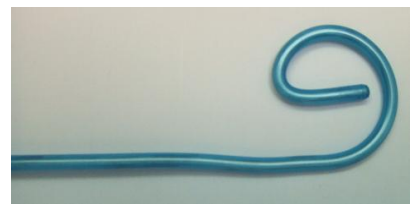


■スタイレットが長い場合: 渦巻の根元を曲げてストッパーにする



ポイント: 挿入前に気管チューブの形に少しカーブをつけておくと挿管しやすい。

チューブに挿入後、更に適切な形にカーブさせる。

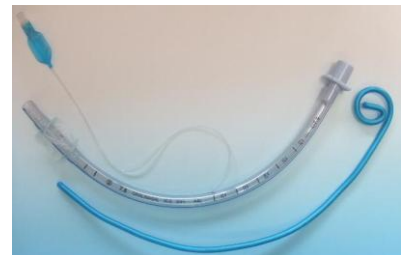

【スタイレットと気管挿管の適応サイズ対応表】

| | アダプター有り | アダプター無し | 気管挿管 |
|-----|---------------|----------|----------|
| サイズ | Fr(mm)×長さ(mm) | | ID(mm) |
| XS | 6Fr × 180 | 6Fr×200 | 2.5~3.5 |
| S | 10Fr × 240 | 10Fr×280 | 4.0~6.0 |
| M | 12Fr × 280 | 12Fr×310 | 6.5~7.0 |
| L | 14Fr × 330 | 14Fr×350 | 7.5~10.0 |

アダプター有りとなしの違いは?

無し: 長さが調節できる

有り:

気管挿管とのサイズが適切なら
長さの調節無しに使える。

※スタイレットと気管挿管は、上記の正しいサイズの組合せでご使用ください。

販売: 京中貿易株式会社

604-8371京都市中京区神泉苑町1番地2

Tel.075-811-0545 Fax.075-811-0544

office@kyoling.net

http://kyoling.net/

第一種医療機器製造販売業

許可番号:26B1X10007

製造: 杭州京冷医療機器有限公司

中国浙江省杭州市經濟開發区

16号大街9号

http://kyoling.com/

医療機器外国製造業者

認定番号:BG10500217

